



Salute & Benessere

Air 50

C A R E

Sistema per aerosolterapia e doccia nasale ad aria compressa



- Nebulizzatore veloce EASY 2 ad alta efficienza e facile da usare (solo **2 PEZZI**)
- Doccia nasale NOSE CLEAN PRO per il trattamento delle vie aeree superiori
- Compressore potente, silenzioso
- Design medico e borsina di trasporto
- Garanzia 3 anni

AIR 50 CARE è un sistema per aerosolterapia ad aria compressa per il trattamento di patologie respiratorie occasionali.

AIR 50 CARE ha un design medico studiato per garantire un adeguato confort e la massima sicurezza durante la terapia.

Dispone di un compressore potente e silenzioso.

È corredato di una pratica borsina di trasporto.

AIR 50 CARE è dotato del nebulizzatore veloce EASY 2 e della doccia nasale NOSE CLEAN PRO per il trattamento delle vie aeree superiori.

Guarda il video



Tattamento efficace per le basse e medie vie respiratorie



Tattamento efficace per le alte vie respiratorie



Nebulizza qualsiasi farmaco per aerosolterapia



Elevata velocità di nebulizzazione



Bassa rumorosità



Design medico ergonomico

Cartone da 6 pezzi
Cod. 12367
AIR 50 CARE



8 056209 783673

VELOCITA' DI NEBULIZZAZIONE

0,42* ml/min

*TESTATO CON NaCl 0,9%



USO OCCASIONALE DOMICILIARE

Principio di funzionamento del nebulizzatore EASY 2 e della doccia nasale NOSE CLEAN PRO



EASY 2 è un nebulizzatore ad alta efficienza. L'ampia camera di nebulizzazione **1** incrementa la quantità di farmaco nebulizzato mentre l'aria richiamata dall'efficiente sistema Venturi **2** aumenta la velocità di nebulizzazione.

È composto da soli **2 PEZZI** per facilitare il montaggio, la pulizia e non rischiare di perdere piccoli componenti. **RACCOMANDATO** per il trattamento di patologie respiratorie occasionali.

NOSE CLEAN PRO è una doccia nasale per il trattamento delle vie aeree superiori.

Versare la soluzione nella camera di nebulizzazione **1**. Premere il tasto **2** per micronizzare la soluzione durante la fase inspiratoria. Rilasciare il tasto e soffiare delicatamente attraverso la narice trattata direttamente nel NOSE CLEAN PRO. Residui di muco o della soluzione verranno raccolte nell'apposita camera **3**.

RACCOMANDATO per il trattamento di RINITI, RINOSINUSITI, ecc.

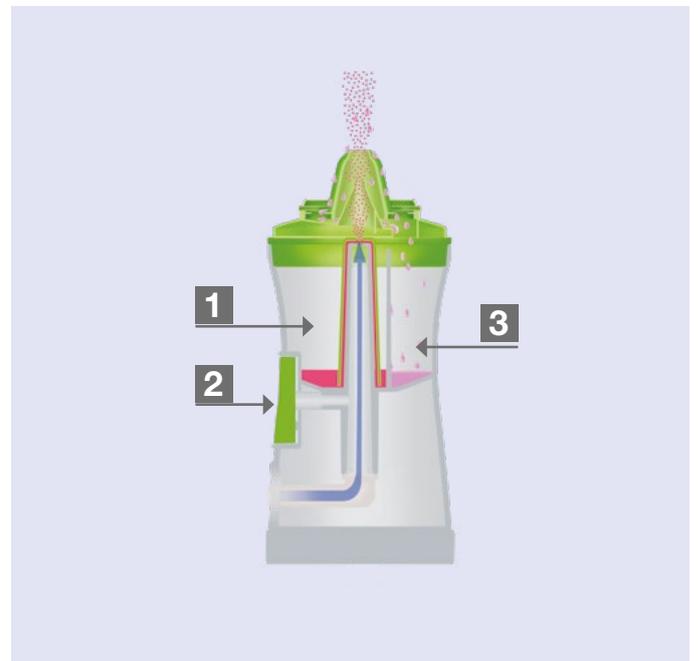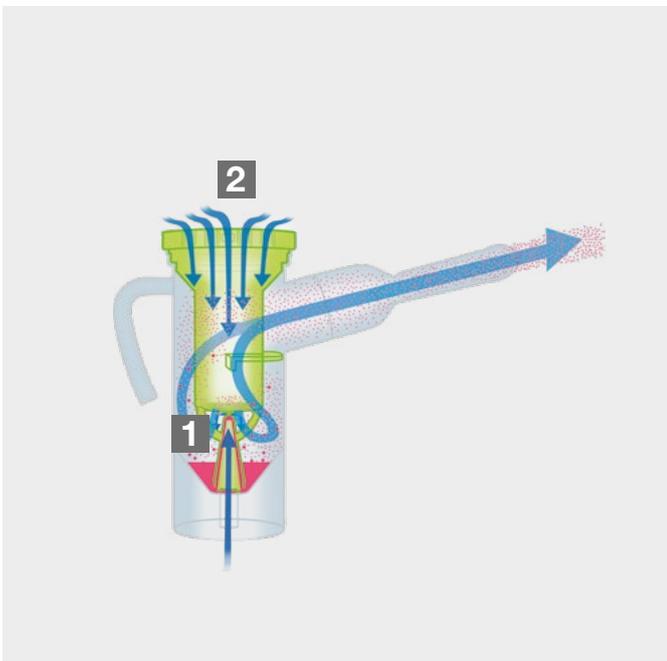

Dotazione

Compressore, nebulizzatore EASY 2, boccaglio, mascherina adulti e pediatrica con elastico, doccia nasale NOSE CLEAN PRO con adattatore adulti e pediatrico, tubo aria, 5 filtri aria di ricambio, borsina di trasporto, manuale d'uso.

SPECIFICHE TECNICHE

Nebulizzatore	EASY 2
Volume massimo di riempimento	8 ml
Volume minimo di riempimento	2 ml
Volume residuo	0,5 ml
Velocità di nebulizzazione (NaCl 0,9%)	0,42 ml/min
Dimensione delle particelle	3,93 µm - 63% < 5 µm
Doccia Nasale	NOSE CLEAN PRO
Volume massimo di riempimento	20 ml
Volume minimo di riempimento	2 ml
Volume residuo	0,6 ml
Lunghezza tubo aria	1,5 m
Pressione massima	2,4 bar
Flusso al compressore	13 L/min
Flusso operativo	5,2 L/min
Livello sonoro (senza tubo)	55 dBA
Ciclo operativo	30 min ON / 30 min OFF
Condizioni d'esercizio	10-40 °C / 50-104 °F; 30-85% umidità relativa massima; 700-1060 hPa pressione atmosferica
Condizioni di spedizione e stoccaggio	-20 - +60 °C / -4 - +140 °F; 10-95% umidità relativa massima; 700-1060 hPa pressione atmosferica
Peso prodotto	1.250 g
Dimensioni	184 x 146 x 87 mm
Alimentazione	Spina a rete
Vita utile	1.000 ore
Classe IP	IP21
Standard di riferimento	EN13544-1; EN60601-1; EN60601-2; EN60601-1-6; IEC60601-1-1-11

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

CE0413