




therapist® 120

Magnetoterapia home-care

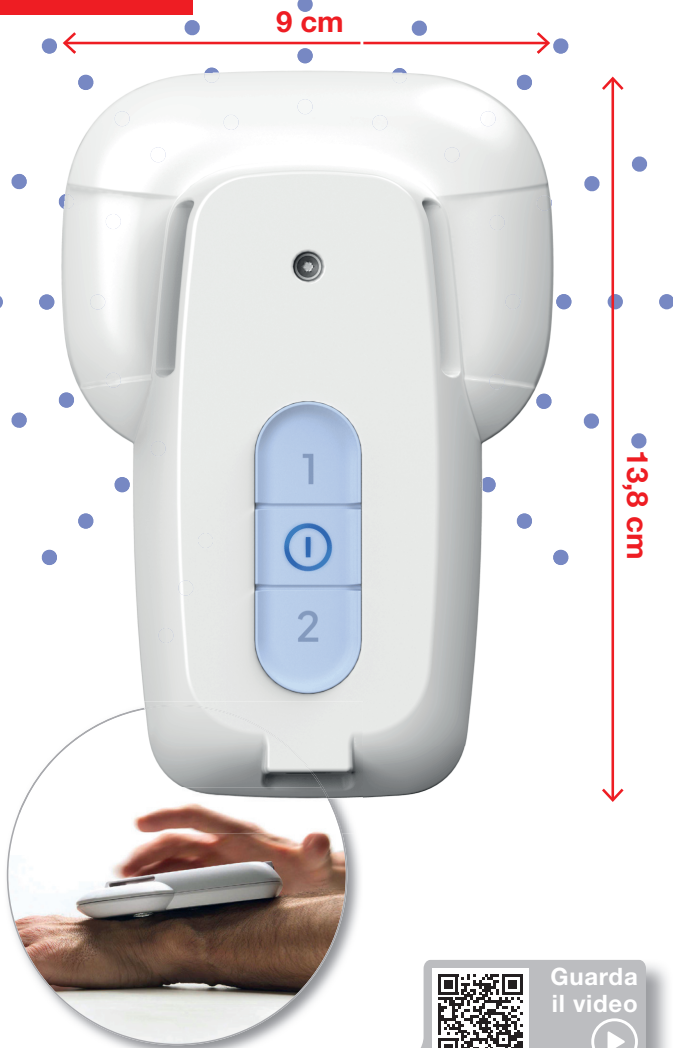

- Dispositivo medico per magnetoterapia a campi magnetici pulsati fino a **120 Gauss**
- Ideale per uso home-care
- 2 programmi universali a codice variabile, per tutti i trattamenti
- Tecnologia brevettata con solenoide integrato
- Senza fasce, fili o accessori esterni
- Batteria ricaricabile per permettere la mobilità
- Design iconico e funzionale di dimensioni ridotte
- Semplice da utilizzare, con segnale acustico di impostazione funzioni e fine trattamento

THERAPIST® 120 è un dispositivo medico brevettato (con solenoide integrato) e made in Italy per la magnetoterapia. Rispetto ai dispositivi tradizionali, di dimensioni e peso superiori, garantisce una migliore compliance alla terapia del paziente con eccellenti risultati grazie a una potenza fino a **120 Gauss**.

THERAPIST® 120 è dotato di 2 programmi universali (Dolore Acuto o Dolore Cronico) a codice variabile in grado di rispondere a tutte le maggiori esigenze terapeutiche. Per queste sue caratteristiche THERAPIST® 120 è raccomandato per uso home-care.

Grazie alle dimensioni tascabili, alla sua leggerezza, alla batteria di lunga durata può essere portato ovunque e indossato comodamente anche sopra i vestiti e il gesso. Per il suo design iconico, la sua ergonomia e l'estrema semplicità d'uso rappresenta una vera rivoluzione nel contrasto a dolori, traumi e fratture.



Guarda il video



Cod. 12385
THERAPIST®120




MADE IN ITALY


 Magnetoterapia
a campi magnetici
pulsati


Tested
 Potenza
testata


Patented
 Tecnologia
brevettata

2 FASCE ELASTICHE

DA POSIZIONARE DIRETTAMENTE
SULLA ZONA DA TRATTARE,
SOPRA IL VESTITO O IL GESSO.



THERAPIST® è dotato di 2 programmi preimpostati a codice variabile (DOLORE ACUTO - DOLORE CRONICO E PATOLOGIE OSSEE).

Diversamente dai dispositivi con programmi tradizionali, THERAPIST effettua una scansione dei parametri terapeutici in base alla patologia da trattare garantendo un trattamento efficace e un'estrema facilità d'uso per il paziente.

P1 PROGRAMMA DOLORE ACUTO


- Artrite reumatoide
- Sindrome del tunnel carpale
- Periartriti e Tendiniti
- Lombalgia, Lombosciatalgia e Cervicobrachialgia acuta
- Morbo di Sudeck/Algodistrofia acuta
- Neuropatie acute
- Traumi muscolari o articolari
- Reumatismi muscolari

P2 PROGRAMMA DOLORE CRONICO E PATOLOGIE OSSEE

- Artrosi
- Fibromialgia
- Fratture, Malattie dell'osso, Osteoporosi
- Lombalgia, Lombosciatalgia e Cervicobrachialgia cronica
- Morbo di Sudeck/Algodistrofia cronica
- Neuropatie croniche
- Traumi muscolari o articolari
- Affaticamento muscolare da sport



ESEMPI DI APPLICAZIONE:
collo, spalla, schiena, ginocchio, gomito

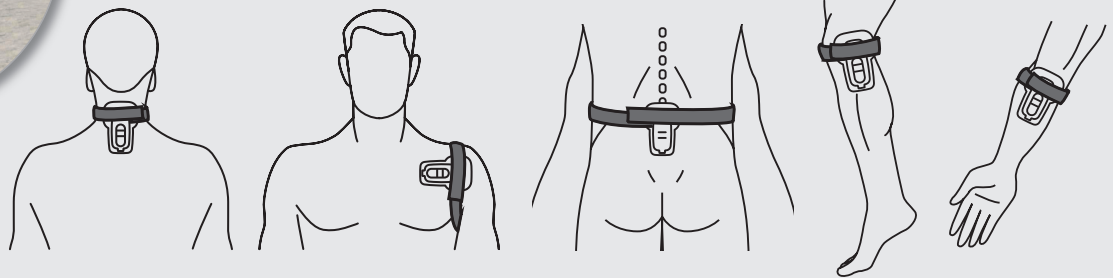

Dotazione

Unità per magnetoterapia, 2 fasce elastiche, alimentatore, manuale d'uso.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentatori compatibili:	Mod. SAW20-050-2400GD
Tensione di alimentazione:	100-240 Vac; 50/60 Hz; alimentatore non medicale
Assorbimento:	0,6 A
Tensione di uscita:	5 Vdc 2,4 A
Batteria ricaricabile tipo Li-Pol:	3,7 Vdc 1900 mAh
Tempo ricarica:	4 ore circa
Frequenza di pilotaggio del diffusore (integrato nel dispositivo):	da 5 a 500 [Hz] $\pm 20\%$.
Intensità magnetica massima (Valore picco)	120 [Gauss] $\pm 20\%$ per canale
Classificazione rispetto all'ingresso di polvere e liquidi:	IP22
Condizioni ambientali di funzionamento:	Temperatura da +5 a +40 °C Umidità relativa da 15% a 93% Pressione da 700 a 1060 hPa
Condizioni ambientali di trasporto e stoccaggio:	Temperatura da -20 a + 60 °C Umidità relativa < 93% Pressione da 700 a 1060 hPa
Tempo necessario affinché il dispositivo sia pronto per l'uso previsto, dalla temperatura minima dichiarata:	30 minuti
Tempo necessario affinché il dispositivo sia pronto per l'uso previsto, dalla temperatura massima dichiarata:	30 minuti
Dimensioni Apparecchio:	138 x 93 x 24 mm
Peso:	350 g

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

