



Salute & Benessere

Air 60 NEXT

Sistema digitale per aerosolterapia con doccia nasale



- Silenzioso: 45 dBA
- Velocità di nebulizzazione 0,40 ml/min
- LED screen display per impostare o misurare i tempi della terapia
- Nebulizzatore ad alta efficienza EASY 2
- Doccia nasale NOSE CLEAN PRO con adattatore adulti e pediatrico
- Garanzia 3 anni

AIR 60 NEXT è un innovativo aerosol digitale per il trattamento di patologie respiratorie occasionali con led screen display per impostare o misurare i tempi della terapia. AIR 60 NEXT ha un design medico studiato per garantire un adeguato comfort e la massima sicurezza durante il trattamento.

Dispone di un compressore potente e silenzioso ed è dotato del nebulizzatore veloce easy 2 e della doccia nasale NOSE CLEAN PRO per il trattamento delle vie aeree superiori.



Trattamento efficace per le basse e medie vie respiratorie



Trattamento efficace per le alte vie respiratorie



Nebulizza qualsiasi farmaco per aerosolterapia



Elevata velocità di nebulizzazione



Bassa rumorosità



Led screen display

Cartone da 6 pezzi
Cod. 12493
AIR 60 NEXT



VELOCITA' DI NEBULIZZAZIONE
0,40* ml/min
*TESTATO CON NaCl 0,9%



USO OCCASIONALE
DOMICILIARE



Principio di funzionamento del nebulizzatore EASY 2 e della doccia nasale NOSE CLEAN PRO



EASY 2 è un nebulizzatore ad alta efficienza. L'ampia camera di nebulizzazione **1** incrementa la quantità di farmaco nebulizzato mentre l'aria richiamata dall'efficiente sistema Venturi **2** aumenta la velocità di nebulizzazione.

È composto da soli **2 PEZZI** per facilitare il montaggio, la pulizia e non rischiare di perdere piccoli componenti. **RACCOMANDATO** per il trattamento di patologie respiratorie occasionali.

NOSE CLEAN PRO è una doccia nasale per il trattamento delle vie aeree superiori.

Versare la soluzione nella camera di nebulizzazione **1**. Premere il tasto **2** per micronizzare la soluzione durante la fase inspiratoria. Rilasciare il tasto e soffiare delicatamente attraverso la narice trattata direttamente nel NOSE CLEAN PRO. Residui di muco o della soluzione verranno raccolte nell'apposita camera **3**.

RACCOMANDATO per il trattamento di RINITI, RINOSINUSITI, ecc.

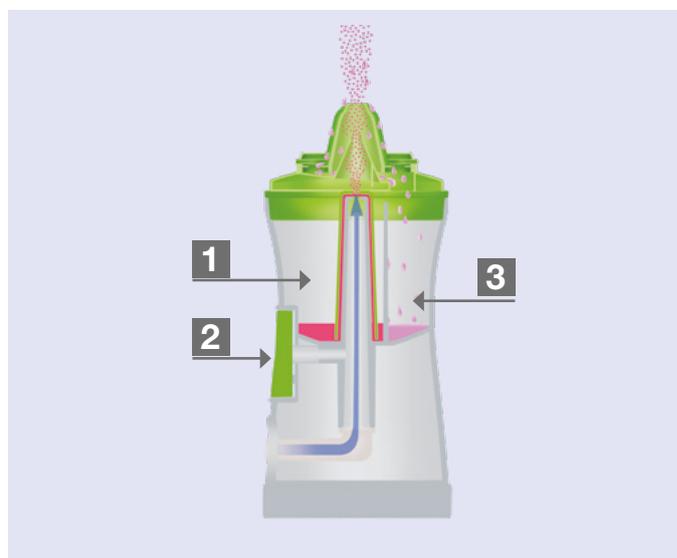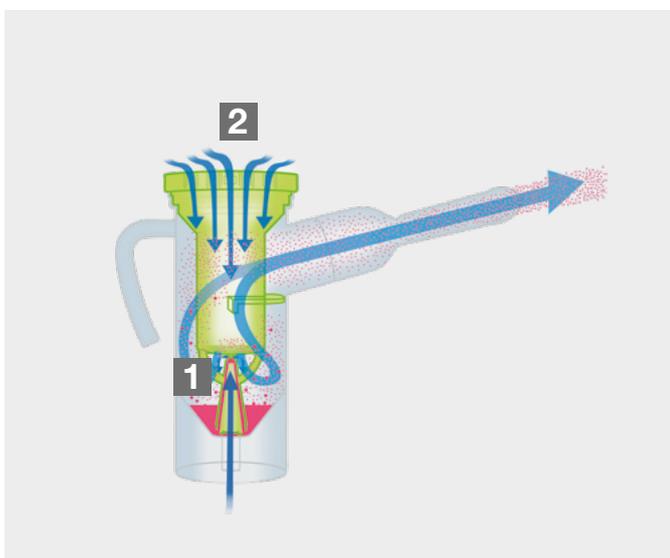

Dotazione

Compressore digitale, nebulizzatore EASY 2, boccaglio, erogatore nasale morbido, mascherina adulti e pediatrica, doccia nasale NOSE CLEAN PRO, tubo aria, 5 filtri aria di ricambio, trasformatore, sacca di trasporto, manuale d'uso.



SPECIFICHE TECNICHE

Nebulizzatore	EASY 2
Volume massimo di riempimento	8 ml
Volume minimo di riempimento	2 ml
Volume residuo	0,5 ml
Velocità di nebulizzazione (NaCl 0,9%)	0,40 ml/min
Dimensione delle particelle	4,50 µm - 60% < 5 µm
Doccia Nasale	NOSE CLEAN PRO
Volume massimo di riempimento	20 ml
Volume minimo di riempimento	2 ml
Volume residuo	0,6 ml
Lunghezza tubo aria:	1,5 m
Pressione massima:	≥ 100 kPa
Flusso al compressore:	≥ 4 L/min
Livello sonoro (senza tubo):	circa 45 dBA
Ciclo operativo:	20 min ON / 40 min OFF
Condizioni d'esercizio:	5-40 °C; 15-90% umidità relativa massima; 700-1060 hPa pressione atmosferica
Condizioni di spedizione e stoccaggio:	-25 - +70 °C; 15-90% umidità relativa; 700-1060 hPa pressione atmosferica
Peso prodotto:	428 g
Dimensioni:	146 x 81 mm
Alimentazione:	spina a rete
Ingresso adattatore:	100-240V – 50/60Hz, 500mA Max
Uscita adattatore:	DC 12V 1,0A
Vita utile:	300 ore
Classe IP:	IPX2
Standard di riferimento:	IEC 60601-1-2

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

